

ウーベルト 組み立て方



株式会社 東北医工



←QRコードから
動画で閲覧する
こともできます

1. ウーベルト、付属品の取り出し

- ① 箱からウーベルト本体を取り出し、テーブルの上に載せます。
- ② ディスプレイが入った箱からディスプレイスタンド、付属品が入った箱を取り出します。
- ③ 中にはケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書、ディスプレイスタンドが入っています。



2.ディスプレイの取り出し

- ④ ディスプレイが入った箱を開封し、ディスプレイを取り出します。



3.ディスプレイスタンドの組み立て

- ⑤ ○で囲んだロックタブを上
に引き上げると、スタ
ンドが上がります。
(一気に上がるのでケガに
ご注意ください。)



3.ディスプレイスタンドの組み立て

- ⑥ スタンドが上がったら
ロックタブを元の位置に
戻し、○で囲んだディス
プレイの固定ねじを外し
ます。



3.ディスプレイスタンドの組み立て

- ⑦ 組み立てたスタンドにディスプレイを取り付け、外した固定ねじで固定します。



4. ケーブルの接続

- ⑧ ウーベルトをディスプレイの前に設置します。
- ⑨ ACアダプターに電源ケーブルを接続します。(電源ケーブルは2本付属していますが、どちらを使用しても問題ありません。)



4. ケーブルの接続

- ⑩ ウーベルト背面にあるACアダプターインレットに「**カチッ**」と音がするよう、奥まで電源ケーブルを接続します。



接続する際は○で囲った**凸部分**が**上向き**になるよう注意しましょう。



4. ケーブルの接続

- ⑪ HDMIケーブルをディスプレイとウーベルト背面のHDMIポートに接続します。
- ⑫ ディスプレイの電源ケーブルをディスプレイ背面に接続します。



5.電源を入れる

⑬ ロボットハンドに貼られているテープをはがします。



⑭ ウーベルトとディスプレイの電源プラグをコンセントに接続し、
ディスプレイ→ウーベルトの順に電源スイッチを入れます。



5.電源を入れる

- ⑮ 電源を入れてから約45秒後に設定画面が表示されます。

詳しい操作方法については、取扱説明書をご覧ください。

